



Reagenti: Liquidi e pronti all'uso.

Stabilità dei Reagenti: Fino alla data di scadenza riportata in etichetta.

Temperatura di lavoro: 37° C

Bireagente

METODO TEST	Colorimetrico
METODOLOGIA	End Point
TIPO DI PROCESSO	Lineare
FILTRO	510/700
DIREZIONE REAZIONE	Incremento
REAGENTE #1 (Tampone)	200 µl
REAGENTE #2 (Enzimi)	50 µl
CAMPIONE STARTER	Inattivo
TEMPO DI RITARDO (sec)	0
TEMPO DI INCUBAZIONE (sec)	300
TEMPO DI LETTURA (sec)	10
UNITA' SIERO	mg/dl
UNITA' URINE	
NUMERO DI LAVAGGI AGO	2
NUMERO DI LAVAGGI CUVETTE	2
BIANCO DINAMICO	Inattivo
BIANCO REAGENTE	Ogni run
LIMITE REAGENTE (mABS)	100
ACCETTABILITA' CURVA (%)	100
FATTORE STRUMENTALE	1.000
SHIFT	0.000

PARAMETRI PER SIERO

NOME	Acido Urico
CAMPIONE µl	7
PRE - DILUIZIONE	1.00
DILUIZIONE	
FATTORE	1.00
LIMITE TEST (Conc)	25
ABS INIZIALE (mABS)	1000
ABS FINALE (mABS)	3000
MAX ABS DELTA (mABS)	2000
RIPETIZIONE IPERATTIVI	Inattivo
RIPETIZIONE PATOLOGICI	Inattivo
VALORI NORMALI	
Uomini	(*)
Donne	(*)
Bambini	(*)

(*) Parametri a cura dell'operatore

Note:

Per ulteriori chiarimenti far riferimento alla metodica allegata alla confezione.